

Mengde:	Produksjonsnr.:	Dato:	Godkjent:
Utbytte	Skåler : ia	Rør:	Flasker: ia

1. Bruksområde

Brukes på referanselaboratoriet for enteropatogene bakterier, til påvisning av H-antigener.

2. Ingredienser

Mål/vei inn	Produsent	Katalognr.	Batch nr.	Helsefare	Rom nr.	Mengde	Sign
Sverme agar	SSI	29565		ia	Frysetorget Kjøleskap 10144	200 ml	

3. Prosedyre

	Tilberedning	Instr. Reg.nr.	Sign
Blanding	Tar frem antall ønsket flasker. Smelter i stivneren (sett til koking) eller i vannbad ved 100 °C i ca. 30 min.	2554 4788	
Tilsetting	ia	-	-
pH-måling	ia	-	-
Osmolaritet	ia	-	-
Fordeling	Tappes aseptisk (rom U237) i "kikhosterør" a 25 ml. Det kan også tappes i vanlig rør som kan inneholde 10 eller 15 ml av Svermeagar.	10230	
Sterilisering	Filtrering: ia	Autoklaving: ia	Agarkoker: ia
		-	-

4. Anmerkninger/rutiner

Bestilles fra SSI i Danmark. Kjøper ca. 30 flasker a 200 ml om gangen.

NB! Skriv ut analysesertifikatet fra:

www.ssidiagnostica.com for hver ny batch. Gå til Downloads/ Certificate of analysis/ skriv inn varenummer og batchnummer. Skriv batch nummeret og holdbarhetsdato på arbeidskortet før du legger kopi av arbeidskortet ved produksjonen. Du kan også skrive ut analysesertifikat og legge det ved produktet.

5. Prosedyrekontroll/merking

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
pH	ia	-	-
Visuell inspeksjon	Lys gul, klar væske		
Sterilkontroll	ia	-	-
Osmolaritet	ia	-	-
Mengde pr. enhet	25 ml	-	
Holdbarhet	Se analysesertifikat/ flasken		
Etikett	Rørene lappes ikke	-	-
Pakking	Settes i kurver		
Oppbevaring	Kjølig		
Kopi av arbeidsskjema	Legges ved produktet. Om ønskelig kan også analysesertifikatet legges ved.		

6. Referanse

7. Plass for utskrifter og etiketter